

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

BERCEAU

4721

Avant toute utilisation : consultez les documents d'accompagnement.

Contrôle à réception : assurez-vous de l'état du mobilier et de l'intégralité des matériaux, par un contrôle visuel.

DESRIPTIF



Vous venez d'acquérir un produit **SOTEC MEDICAL**. Votre choix s'est porté sur un matériel de qualité qui a fait l'objet d'un contrôle final individuel. Afin de bénéficier de tous les avantages de ce matériel, il est impératif de lire attentivement cette notice et d'en suivre les consignes. Aussi, pour des raisons de sécurité, il est primordial que les utilisateurs de nos dispositifs soient informés des conditions d'utilisation pour un bon fonctionnement.

Descriptif à réception du berceau.

Le berceau 4721 est livré entièrement monté.

Options

- Matelas (Ref : 4721.010)

CARACTERISTIQUES MECANQUES


Caractéristiques mécaniques		Condition d'utilisation, de transport et de stockage	
Longueur du berceau hors-tout	90 cm	10° <	Température ambiante < 40°
Largeur du berceau hors-tout	41 cm	30% <	Humidité relative < 75%
Longueur coque	81.5 cm	700hPa <	Pression atmosphérique < 1060hPa
Largeur coque	36.5 cm		
Hauteur totale sans proclive	100 cm		
Hauteur totale avec proclive	106.5 cm		
Angle d'inclinaison de la coque	6°		
Poids	9 Kg		

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation

Le berceau est équipé d'un système de proclive, qui permet d'incliner la coque.

Pour utiliser cette fonction, il faut d'abord soulever la coque, puis faire basculer le levier de proclive chromée jusqu'en appui sur l'étré de la structure. Reposer la coque en prenant soin de vérifier la bonne stabilité de la coque.

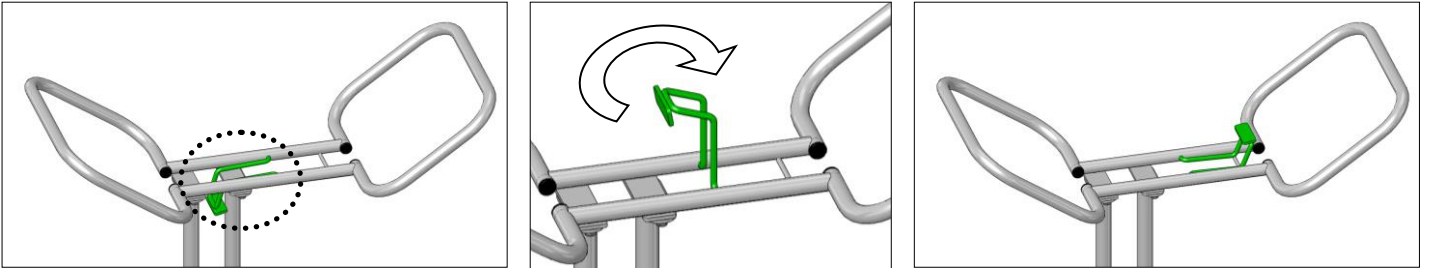

Recommandations d'utilisation

- Vérifier régulièrement le bon serrage des 4 roulettes Ø50.

Limites d'utilisation

Comme tout dispositif, nos produits sont testés et homologués pour résister à des efforts et des cycles limités. Il est donc interdit de mettre une charge supérieure à **10 Kg** sur le berceau.

ENTRETIEN

Nettoyage et désinfection

Nettoyage	Désinfection	Stockage	Choix des désinfectants	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eliminer les tâches visibles. ➤ Nettoyer toutes les surfaces à l'aide d'un détergent neutre (pH7) ou universel. ➤ Laisser sécher. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diffuser uniformément un aérosol désinfectant normalisé sur l'ensemble des surfaces. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remplir le tableau de suivi d'entretien. ➤ Protéger le matériel après désinfection. 	➤ La norme AFNOR NFT 72 permet l'évaluation des différentes actions de désinfection.	
			Norme	Action
			NFT 72 150 NFT 72 151	Bactéricide
			NFT 72 180 NFT 72 181	Virucide
			NFT 72 200 NFT 72 201	Fongicide
NFT 72 230 NFT 72 231	Sporicide			

Précautions obligatoires

- Le matériel désinfecté ne doit, en aucun cas, se trouver en contact avec un matériel non désinfecté.
- Le local et le matériel d'entretien doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Eviter les contacts avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne jamais mélanger plusieurs produits.
- Respecter les dosages de dilution.
- Tout matériel doit être désinfecté à chaque utilisation.
- Tout matériel en fin de vie doit être désinfecté avant destruction.

MAINTENANCE

Une fois par an

- Vérifier que la structure n'a subi aucune déformation
- Contrôler les différentes liaisons (jeu excessif, bruit...)
- Vérifier le bon serrage de tous les éléments



Porter une attention particulière au serrage des roulettes.

- Noter ces informations et la date de vérification sur le carnet d'entretien.



Il ne faut surtout pas essayer de rétablir la déformation dans n'importe quel cas.


ATTENTION : NE PAS DEMONTER L'APPAREIL !

Si un défaut est détecté, contacter immédiatement votre revendeur ou le service technique de la société SOTEC MEDICAL (cf. chapitre Garantie) pour un diagnostic complet. Si un doute subsiste, ne pas utiliser l'appareil.

GARANTIE

➤ Ce matériel est **garanti 3 ans** par le constructeur.

➤ En cas de problème, contacter votre revendeur ou notre service technique :

 **02.40.33.89.67.**

➤ **Responsabilité** : La société SOTEC MEDICAL se dégage de toute responsabilité si un accident survient à la suite d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un démontage de l'appareil. L'appareil sera exclu de la garantie et de la responsabilité de la société pour tout ajout d'accessoire non commercialisé par SOTEC MEDICAL.

SUIVI D'ENTRETIEN		
Référence du berceau : 4721		
Date de facturation du berceau (date de départ de la garantie) : .././....		
Date	Type d'intervention – action corrective	Nom du technicien

En cas de retour du produit chez le revendeur ou le fabricant, merci de désinfecter le matériel et de faire suivre le "suivi d'entretien" (original ou photocopie) ci-dessus.



SOTEC MEDICAL S.A.S.

12, rue de la Garde – B.P. 93572 – 44335 NANTES cedex 3 - France

☎ 02 40 33 89 60 – 📠 02 40 03 74 44

www.sotecmedical.com – ✉ sotec@sotecmedical.com